

AANWIJZINGEN VOOR HET AANTREKKEN VAN EEN CHIRURGISCHE JAS


HALYARD* Chirurgische jassen zijn gevouwen volgens de 'book fold'-methode voor een snelle en eenvoudige steriele presentatie. Volg onderstaande stappen om de steriliteit te behouden:



Stap 1: Pak de jas vast bij de enkele vouw onder de hals.



Stap 2: Plaats de vingers van beide handen onder de zijflappen van de armsgaten.

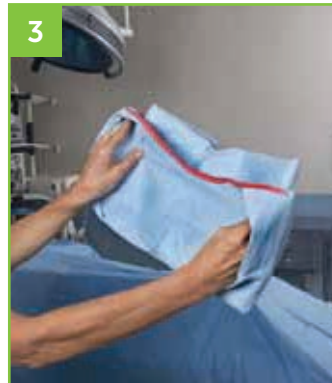

Stap 3: Open de jas naar de zijkanten.



Stap 4: Laat de jas openvallen. Steek beide armen door de mouwen.



Stap 5: Laat de omloopverpleegkundige de aan de binnenzijde bevestigde taillestrikbandjes aan de achterkant vastmaken en daarna de halssluiting.



Stap 6: Pak het bovenste deel van het kaartje van het strikbandje vast met uw rechterhand en haal het linkerstrikbandje los met uw linkerhand.



Stap 7: Reik het onderste deel van het kaartje aan de assistent aan.



Stap 8: Draai linksom waarbij u het taillestrikbandje uit het kaartje trekt dat door de assistent wordt vastgehouden. Knoop de taillestrikbandjes vast aan de linkerzijde van de jas.

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Care Team van Halyard:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)

Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BELUX)

Fax: 0800 78 774 (gratis uit BELUX)

customerservice.bnl@hyh.com